

## CHECKLIST AANSLUITEN ECG RECORDER

Voor de kwaliteit van het onderzoek is het belangrijk dat onderstaande vier stappen goed worden uitgevoerd.

### 1 HUIDPREPARATIE

- 1 Scheren van mannelijke patiënten op de posities van de elektrodes.
- 2 De huid opruwen (nodig voor goede geleiding) en vervolgens goed ontvetten met alcohol voor een goede hechting van de elektrodes.
- 3 De huid goed droogmaken.



### 2 PLAKWIJZE ELEKTRODES

#### A HOLTER / EVENT

- 1 De dubbele neutrale elektrode plakt u aan de bovenzijde van het borstbeen.
- 2 V1: 4<sup>de</sup> intercostale ruimte tussen de 4<sup>de</sup> en 5<sup>de</sup> rib rechts naast het borstbeen.
- 3 V5: 5<sup>de</sup> intercostale ruimte tussen de 5<sup>de</sup> en 6<sup>de</sup> rib in de voorste axillaire lijn.
- 4 Plak de elektrodes af met tape.

#### B RUST ECG

- 1 C1: 4<sup>de</sup> intercostale ruimte rechts naast het borstbeen.
- 2 C2: 4<sup>de</sup> intercostale ruimte links naast het borstbeen.
- 3 C3: Halverwege de verbindingslijn C2-C4.
- 4 C4: 5<sup>de</sup> intercostale ruimte in de medioclaviculaire lijn.
- 5 C5: zelfde horizontale vlak als C4, in de voorste axillaire lijn.
- 6 C6: zelfde horizontale vlak als C4, in de middelste axillaire lijn.
- 7 Zie voorbeeld voor de extremiteiten afleidingen.

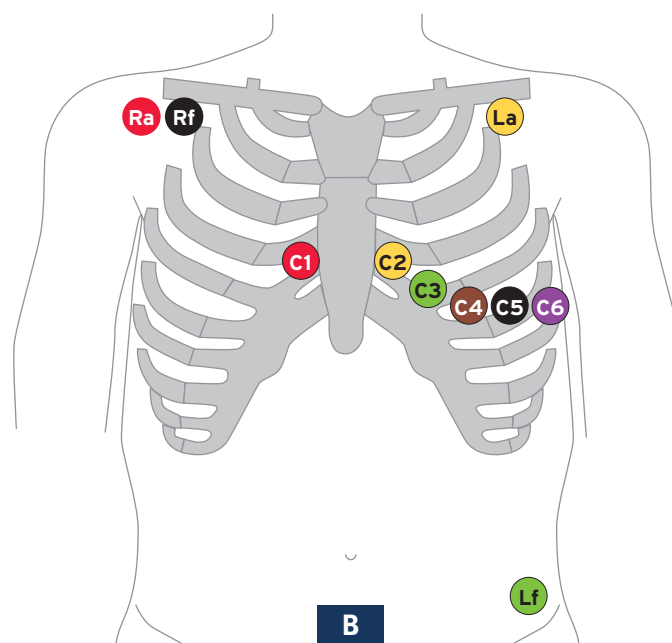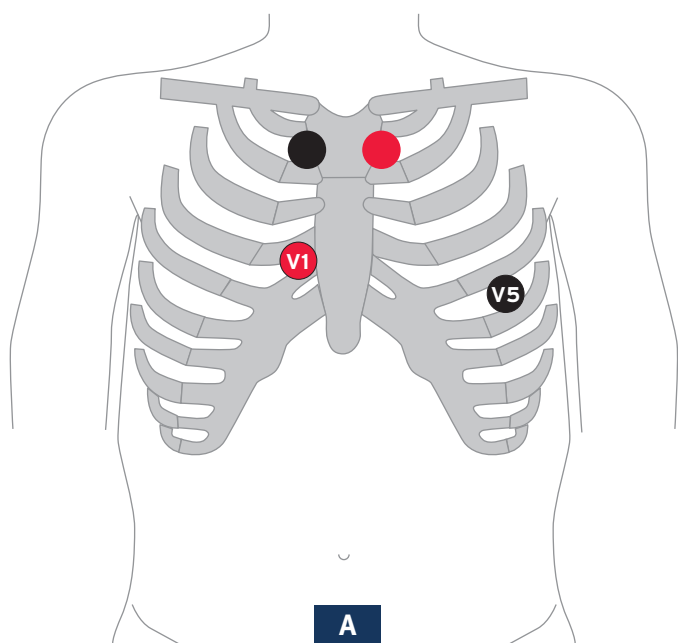

## CHECKLIST AANSLUITEN ECG RECORDER

### 3 AANSLUITEN RECORDER

#### HOLTER / EVENT

- 1 Plaats de doorzichtige connector van de elektrode in de connectorpoort van de recorder.

#### RUST ECG (12 AFLEIDINGEN)

- 1 Plaats de witte connector, de elektrode C1 t/m C6 in de witte connectorpoort.
- 2 Plaats de blauwe connector (extremiteten) in de blauwe connectorpoort.

### 4 AANZETTEN RECORDER EN STARTTIJD OPNAME

Om het dagboek met de Holter en/of Event opname te synchroniseren, is het noteren van de starttijd op het dagboek van belang! De **starttijd** van de opname is het moment waarop u de recorder **aanzet**.

#### HET STARTEN VAN DE OPNAME



#### Let op:

Om de opname te starten houdt u de eventknop op de ECG recorder 5 seconden ingedrukt.

Na 5 seconden laat u de eventknop los en checkt u of het onderste ledlampje groen gaat knipperen.



Nu is de opname gestart en noteert u de starttijd op het dagboek.

#### HARTIS DAGBOEK

Naam Patiënt:		SO-klantnummer:		Instelling:	
Geb. Datum:		BSN:		Aanvragend arts:	
Startdatum:		Starttijd:		Rec. nr.:	
		Faxnummer: 088 04 50 661		Email: dagboekjes@hartis.nl	
<b>ACTIVITEITEN:</b>			<b>KLACHTEN:</b>		
Van:	Tot:	Omschrijving activiteiten:	Tijdstip:	Omschrijving klachten:	

Kijk op onze website - [www.hartis.nl](http://www.hartis.nl) - voor de meest actuele informatie.