

CHECKLIST AANSLUITEN ECG RECORDER

Voor de kwaliteit van het onderzoek is het belangrijk dat onderstaande vier stappen goed worden uitgevoerd.

1 HUIDPREPARATIE

- 1 Scheren van mannelijke patiënten op de posities van de elektrodes.
- 2 De huid opruwen (nodig voor goede geleiding) en vervolgens goed ontvetten met alcohol voor een goede hechting van de elektrodes.
- 3 De huid goed droogmaken.



2 PLAKWIJZE ELECTRODES

A HOLTER / EVENT

- 1 De dubbele neutrale elektrode plakt u aan de bovenzijde van het borstbeen.
- 2 V1: 4^{de} intercostale ruimte tussen de 4^{de} en 5^{de} rib rechts naast het borstbeen.
- 3 V5: 5^{de} intercostale ruimte tussen de 5^{de} en 6^{de} rib in de voorste axillaire lijn.
- 4 Plak de elektrodes af met tape.

B RUST ECG

- 1 C1: 4^{de} intercostale ruimte rechts naast het borstbeen.
- 2 C2: 4^{de} intercostale ruimte links naast het borstbeen.
- 3 C3: Halverwege de verbindinglijn C2-C4.
- 4 C4: 5^{de} intercostale ruimte in de medioclaviculaire lijn.
- 5 C5: zelfde horizontale vlak als C4, in de voorste axillaire lijn.
- 6 C6: zelfde horizontale vlak als C4, in de middelste axillaire lijn.
- 7 Zie voorbeeld voor de extremiteiten afleidingen.

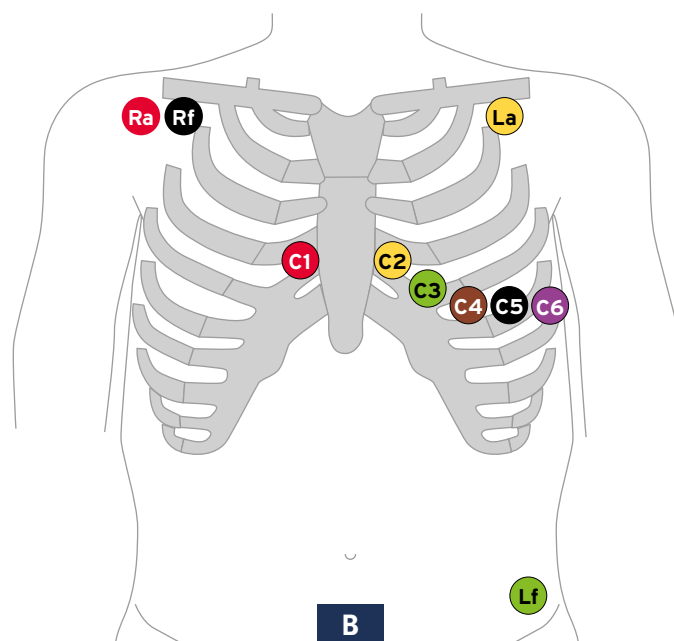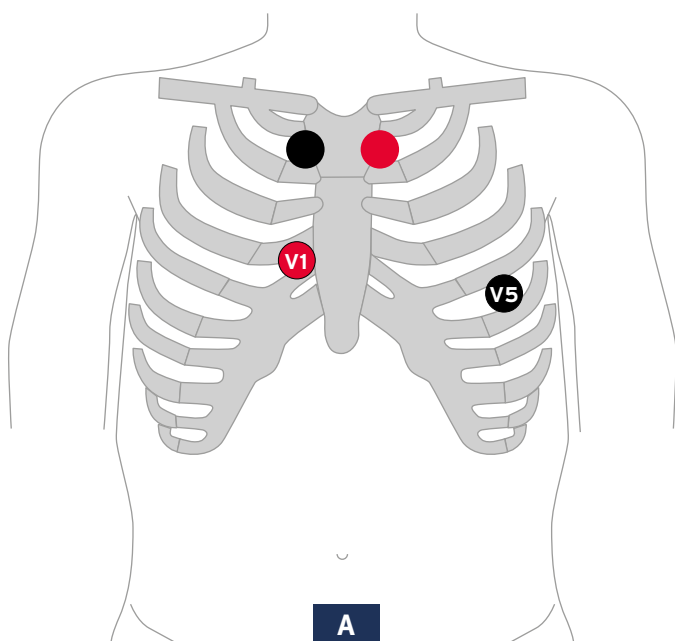

CHECKLIST AANSLUITEN ECG RECORDER

3 AANSLUITEN RECORDER

HOLTER / EVENT

- 1 Plaats de witte connector in de witte connectorpoort, zie de afbeelding hiernaast. De blauwe connectorpoort wordt niet gebruikt!

RUST ECG (12 AFLEIDINGEN)


- 1 Plaats de witte connector, de electrode C1 t/m C6 in de witte connectorpoort.
- 2 Plaats de blauwe connector (extremiteiten) in de blauwe connectorpoort.



4 STARTTIJD OPNAME

Om het dagboek met de Holter en/of Event opname te synchroniseren, is het noteren van de starttijd op het dagboek van belang! De **starttijd** van de opname is het moment waarop u de recorder **AANZET**.

Afhankelijk van het model werkt het aanzetten van de recorder als volgt:

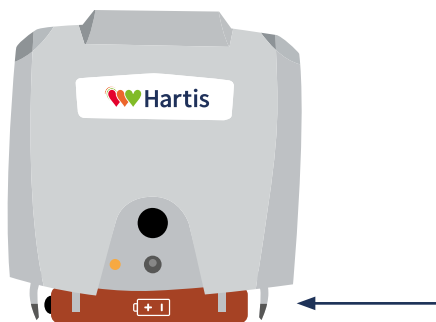

Bij het plaatsen van de batterij, gaat de recorder automatisch aan. Het gele lampje gaat knipperen.



De 'Event' knop is tevens de 'aan' knop. Het lampje gaat bij inschakelen eenmalig 5 minuten groen branden.

Hartis Dagboek

Naam Patiënt:		SO-klantnummer:		Instelling:	
Geb. Datum:		BSN:		Aanvragend arts:	
Startdatum:		Starttijd:		Rec. nr.:	
		Faxnummer: 088 04 50 661		Email: dagboekjes@hartis.nl	
ACTIVITEITEN:			KLACHTEN:		
Van:	Tot:	Omschrijving activiteiten:	Tijdstip:	Omschrijving klachten:	

Op onze website kunt u deze instructie ook in een videovorm terug vinden:
www.hartis.nl/hartis-hartritmediagnostiek/hoe-werkt-het/instructievideo-hartis